

# DESIFOR-ONE



## Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche mit Dosiereinheit à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)	20558
Flasche LEAK SAFE à 2 kg (Kiste 4x2 kg)	20500
Kanister à 5 Liter	20499
Kanister à 10 Liter	20498

## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



## Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Anwendungsanleitung

Fläche mit DESIFOR-ONE - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

## Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	5 min	EN 13697 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	30 min	EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	1 %	15 min	EN 16615 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	0,5 %	120 min	EN 14348 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	1 %	60 min	EN 14348 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 %	15 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	1 %	5 min	EN 14476 (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	3 %	30 min	EN 16777 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	1 %	60 min	EN 14476 (hohe Belastung)

## Wirkstoffe

100 g enthalten 9,0 g 2-Phenoxyethanol; 10,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 9,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin  
BAuA Reg.-Nr. N-63792 N-63793

BAG Reg.-Nr. CHZN6700

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Anwendungshinweise**

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Umgangshinweise**

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 5°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/cm<sup>3</sup>  
GIS-CODE: GD40

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**Kennzeichnung****Gefahr**

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-one>

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

