

# DESIFOR- QUICK PLUS

## Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 2x1 Liter)

## Art.-Nr.

00523



## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



## Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich, Lebensmittelbereich und humanmedizinischen Bereich.

## Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten.

## Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	EN 13697 (hohe Belastung) EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	30 s	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	100 %	1 min	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	1 min	EN 14476 (niedrige Belastung) EN 16777 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	100 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung) EN 16777 (niedrige Belastung)

## Wirkstoffe

100 g enthalten 45,0 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-22859 N-22860

BAG Reg.-Nr. CHZN1998

CE 0482

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Anwendungshinweise

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet



## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,92 g/cm<sup>3</sup>  
GIS-CODE: GDO

pH conc 

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

## Kennzeichnung



**Achtung**  
Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desifor-quick-plus>

DE 260127

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

