

# DESIFOR- QUICK wipes

## Verkaufseinheiten

Softpack à 80 Tücher (Karton 12x80 Tücher)

## Art.-Nr.

20610



## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchgröße 20x20 cm, Tuchqualität 50 g/m<sup>2</sup>
- Tücher biologisch abbaubar
- HACCP-konform



## Anwendungsbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

## Anwendungsanleitung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten.

## Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	1 min	EN 13697 (niedrige Belastung, hohe Belastung) EN 16615 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	100 %	30 s	EN 14348 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	15 s	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Rotaviren	100 %	30 s	EN 14476 (ohne Belastung)
Flächendesinfektion	Noroviren	100 %	30 s	EN 14476 (niedrige Belastung)

## Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-91510

BAG Reg.-Nr. CHZN6745

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Anwendungshinweise**

- Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
- Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m<sup>2</sup>.
- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Umgangshinweise**

- Behälter dicht verschlossen halten
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 30°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen


**Technische Informationen**

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,87 g/cm<sup>3</sup>  
GIS-CODE: GDO

**Kennzeichnung**

**Gefahr**

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Verursacht schwere Augenreizung Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desifor-quick-wipes>

DE 260127

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

