

DESIFOR-SD

Verkaufseinheiten

Flasche mit Sprühkopf à 500 ml (Karton 6x500 ml)

Art.-Nr.

20465

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

20467



Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen (Wellness, Schwimmbad, Sanitärbereich). Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendungsanleitung

Unverdünntes DESIFOR-SD flächendeckend auftragen. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	100 %	5 min	EN 16615 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	100 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	100 %	5 min	EN 14476 (niedrige Belastung, hohe Belastung)

Wirkstoffe

100 g enthalten 0,96 g L-Milchsäure; 4,7 g Ethanol

BAuA Reg.-Nr. N-86675

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Behälter stets geschlossen halten
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/ml
GIS-CODE: GD20

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/desifor-sd>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

