

# DESIFOR- forte AF neu

## Verkaufseinheiten

- Flasche mit Dosiereinheit à 1 Liter (Karton 9x1 Liter)
- Kanister à 5 Liter
- Kanister à 10 Liter

## Art.-Nr.

- 20491
- 20492
- 20493



## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- IHO-gelistet
- HACCP-konform



## Anwendungsbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Als Biozidprodukt: Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Als Medizinprodukt: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Für den professionellen Bereich.

## Anwendungsanleitung

Fläche mit - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

## Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	0,5 %	15 min	EN 13697 (hohe Belastung) EN 16615 (hohe Belastung) VAH (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Tuberkulozid (M. terrae)	2 %	15 min	EN 14348 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 %	15 min	DVV/RKI-Leitlinie (hohe Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid PLUS	2 %	30 min	EN 14476 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Polyomaviren (SV 40)	1 %	15 min	EN 14476 (hohe Belastung)

## Wirkstoffe

100 g enthalten 10,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin  
BAuA Reg.-Nr. N-84407  
BAG Reg.-Nr. CHZN6658  
CE 0124  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Anwendungshinweise**

- Verfallsdatum ab Produktion 3,5 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 3,5 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Umgangshinweise**

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: 0°C bis 40°C
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,01 g/cm<sup>3</sup>

**Kennzeichnung****Gefahr**

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/desifor-forte-af-neu>

DE 260127

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

